


Тест на визначення антигенів NowCheck COVID-19 Ag


КРОК 1.

Уважно прочитайте інструкцію щодо застосування тесту Now Check COVID-19 Ag

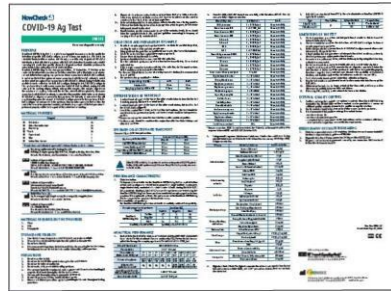


КРОК 2.

Прикріпіть плівку, що постачається разом із набором, до тестового пристрою.

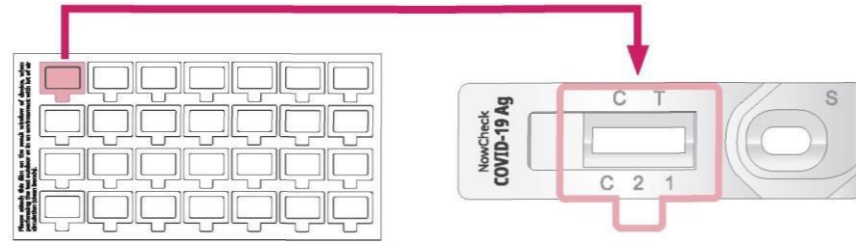

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ


Негативний

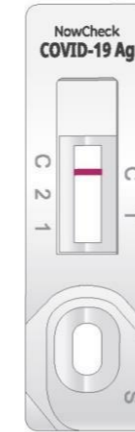

Позитивний



Недійсний

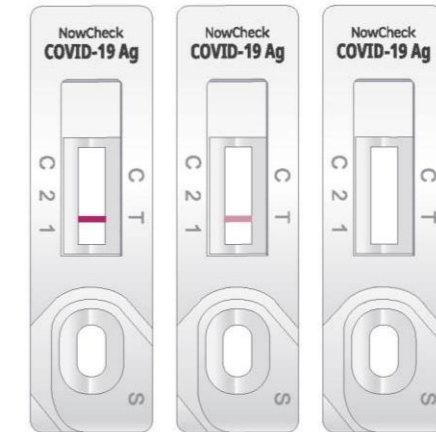


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУ

1. Отримання зразків

[Зразок мазка з носоглотки]


- Введіть тампон в ніздрю пацієнта і проведіть ним по задній поверхні носоглотки. Вийміть тампон з порожнини носа.

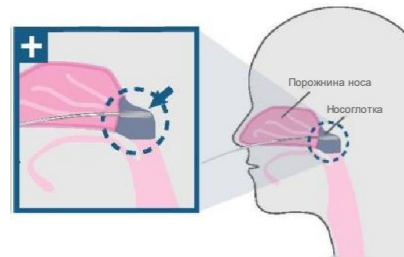

- Помістіть тампон в пробірку з екстракційним буфером. Просочіть тампон рідиною, стискаючи пробірку з буферним розчином більше 5 разів. Вийміть тампон, стискаючи стінки пробірки, щоб вичавити рідину з тампона.



- Щільно притисніть ковпачок з соплом до пробірки.

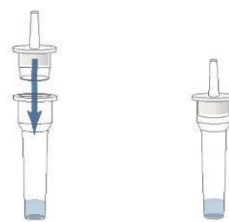

Якщо негайне проведення тесту неможливе, зразок мазка в екстракційному буфері в щільно закритій пробірці може бути поміщений в холодильник при температурі $5 \pm 3^\circ\text{C}$ на 4 години або залишений при температурі $20 \pm 5^\circ\text{C}$ на 1 годину перед тестуванням.

[Зразок у ВТС]

- Використовуючи мікропіпетку, відберіть 350 мкл зразка ВТС.
- Додайте зразок в пробірку з екстракційним буфером (розчин зразка в ВТМ: екстракційний буфер = 1: 1) і ретельно перемішайте.
- Щільно притисніть ковпачок з соплом до пробірки.



2. Аналіз

- Нанесіть 3 краплі екстрагованого зразка на отвір для зразка в тестовому пристрої.



- Зчитайте результат тесту через 15 ~ 30 хв. Не зчитуйте результат після закінчення 30 хвилин.



УВАГА!

- Не зчитуйте результати тесту по закінченні 30 хв. Це може дати помилкові результати.

- У верхній частині вікна результатів з'явиться кольорова смужка, щоб підтвердити, що тест працює правильно. Ця смужка є контрольною лінією (C).
- У нижній частині вікна результатів з'явиться кольорова смужка. Ця смужка - тестова лінія, що показує наявність антигенів SARS-CoV-2
- Навіть якщо контрольна лінія бліда або тестова лінія нерівномірна, слід вважати, що тест виконаний правильно, і результат тесту слід інтерпретувати як позитивний.

- * Наявність будь-якої лінії, якою б блідою вона не була, вважається позитивним результатом.
- * Позитивні результати слід розглядати в поєднанні з клінічними і іншими наявними даними.

СИМВОЛИ

Символ	Опис	Символ	Опис	Символ	Опис
	Виробник		Містить кількість, достатню для проведення <n> тестів		Вказує на те, що виріб крихкий і з ним потрібно поводитися обережно
	Див. інструкцію застосування		Не застосовувати повторно		Код партії Для зазначення номера партії
	Довідковий номер		Використати до		Вказує на утилізацію окремо від інших побутових відходів.
	Дата виготовлення Вказує дату виготовлення		Увага! Вказує на ситуацію, яка, якщо її не запобігти, може привести до		Берегти від впливу сонячних променів
	Примітка		Вказує на те, що продукт слід тримати сухим		Не застосовувати препарат, якщо упаковка пошкоджена.
	Виконання вимог Директиви 98/79 / ЕС про медичні вироби для діагностики в лабораторних умовах.				